

One Step Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)



Komponen (25 Test Kit)

- 25 x Test Card
- 1 x Diluent
- 25 x Dropper
- Instruction For Use

Keuntungan ONE STEP Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)

- Deteksi dini Hepatitis B Virus (HBV) untuk mendeteksi Antigen Permukaan dari hepatitis B (HBsAg) dengan imunokromatografi.
- Cara kerja yang mudah.
- Memberikan hasil jelas dalam 15-20 menit, dengan prosedural kontrol yang terintegrasi.
- Sampel: Plasma, Serum, Whole Blood (Vena dan Perifer).




Evaluasi Klinis

RDT UJI	Panel Plasma (ECLIA)		Sensitivitas	Spesifisitas	NPP	NPN	Akurasi
	Reaktif	Non Reaktif					
Reaktif	50	0	100%	100%	100%	100%	100%
Non Reaktif	0	150					
Jumlah	50	150					

Prosedur Pengecekan

Jangan buka kantong sampai Anda siap untuk melakukan tes, dan tes sekali pakai disarankan untuk digunakan di bawah kelembaban lingkungan yang rendah (Kelembaban Relatif (RH) ≤ 70%) dalam waktu 1 jam.

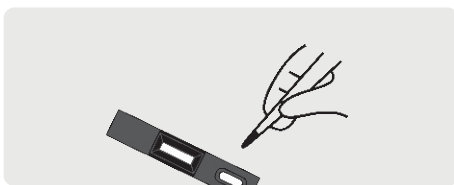

Teteskan 30µL (1 tetes) spesimen ke dalam lubang sampel "S" pada device menggunakan pipet.



Kemudian berikan 1 tetes pengencer sampel (sampel diluent) dan tunggu hasil tes selama 15-20 menit. Tidak lebih dari 20 menit.

Interpretasi Hasil Tes

