



# SINGLE DRUG TEST

1 Parameter

Varian Single Drug Test
Amphetamine (AMP)
Morphine (MOP)
Methamphetamine (MET)
Marijuana (THC)
Cocaine (COC)
Benzodiazepine (BZO)
Carisoprodol (SOMA)



## Komponen (25 Test Strip)



### Evaluasi Klinis

Amphetamine (AMP)	CO : 1000 ng/ml	Negatif 100%	Positif 100%
Morphine (MOP)	CO : 300 ng/ml	Negatif 100%	Positif 100%
Methamphetamine (MET)	CO : 1000 ng/ml	Negatif 100%	Positif 100%
Marijuana (THC)	CO : 50 ng/ml	Negatif 100%	Positif 100%
Cocaine (COC)	CO : 300 ng/ml	Negatif 100%	Positif 100%
Benzodiazepine (BZO)	CO : 300 ng/ml	Negatif 100%	Positif 100%
Carisoprodol (SOMA)	CO : 1000 ng/ml	Negatif 100%	Positif 100%

### Prosedur Penggunaan

Biarkan tes, spesimen urine, dan / atau kontrol mencapai suhu kamar (15-30 °C) sebelum pengujian.

1. Bawa kantong ke suhu ruangan sebelum membuanya. Keluarkan kembali Tes Dipstick dari kantong yang disegel atau tabung tertutup dan gunakan dalam waktu satu jam.
2. Dengan panah menunjuk ke arah spesimen urine, celupkan dipstick uji secara vertikal dalam spesimen urine setidaknya selama 10-15 detik. Jangan melewati garis maksimum (MAX) pada Tes Dipstick saat mencelupkan strip. Lihat ilustrasi di bawah ini.
3. Tempatkan Tes Dipstick pada permukaan datar yang tidak menyerap, mulai pengatur waktu dan tunggu. Garis berwarna muncul. Baca hasil pada 5 menit. Jangan meninterpretasikan hasil setelah 10 menit.

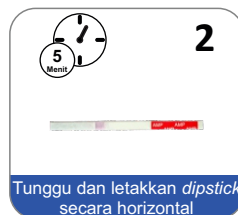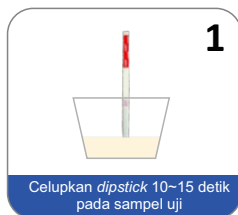

### Interpretasi Hasil Tes

